

Kundeninformation

VACUETTE® TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter




Der neue **VACUETTE®** TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter mit automatischem Rückzug der Kanüle in den Halter überzeugt durch mehr Handhabungskomfort bei der Blutentnahme.

Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus erfolgt über leichten Druck auf die beiden Auslöseknöpfe am Oberteil des Halters. Durch dieses einfache Funktionsprinzip bietet der **VACUETTE®** TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter zuverlässigen Schutz vor Nadelstichverletzungen während des gesamten Blutentnahmeprozesses.


Ideal für die Blutentnahme bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko

- ⤷ Automatischer Kanülenrückzug mittels Federmechanismus
- ⤷ Auslösen des Federmechanismus mit einer Hand
- ⤷ Keine Änderung der herkömmlichen Entnahmetechnik
- ⤷ Aktivierung innerhalb der Patientenvene
- ⤷ Nach Aktivierung ist die Kanüle mit dem vorderen und dem hinteren Ende sicher im Innenteil des Halters verschlossen
- ⤷ Kompatibel mit **VACUETTE®** Mehrfachentnahmekanülen

Anwendung

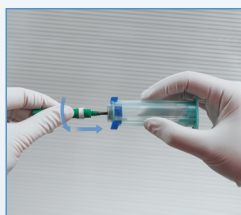

1 Einschrauben der Kanüle

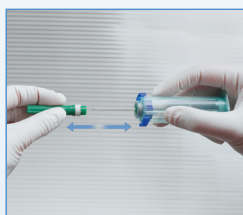

2 Entfernen der Schutzkappe



3 Venenpunktion



4 Einsetzen des Röhrchens



5 Abziehen des Röhrchens



6 Aktivierung des Sicherheitsmechanismus



7 Aktivierter TIPGUARD



8 Entsorgung

Artikelnr.	Bezeichnung	Verpackung
450240	VACUETTE® TIPGUARD Safety Tube Holder	10 Stk./Btl.; 480 Stk./Karton