



VACUETTE® vérvételi készlet Használati utasítás

Alkalmazás

A VACUETTE® vérvételi készletet a mindennapi vérvételi rutin során használják. A terméket csak gondosan kiképzett személyzet használhatja, a jelen használati utasításnak megfelelően.

Termékleírás

A VACUETTE® vérvételi készlet egy steril, egyszerhasználatos termék. Egy szárnyas kanülből áll, amely egy rugalmas csőhöz csatlakozik, amelynek végén egy Luer-csatlakozó található. A termék tetszés szerint Luer-adapterrel ill. Luer-adapterrel + tartóval is kapható.

VACUETTE® Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések:

Biztonsági tudnivalók:

A jelen termék akkor működik a kívánt módon, ha betartjuk a használati utasítást.

- Használat előtt vizsgáljunk meg minden egyes csomagot, hogy nem sérült-e. A sérülteket ne használjuk.
- A használt VACUETTE® vérvételi készletet azonnal helyezzük az ártalmatlanításra szolgáló gyűjtőládába.
- A használat és az ártalmatlanítás során a kezeünket mindig tartjuk a tű mögött. A szárnyas kanüloket ne zárjuk vissza! Fennáll a tűszúrás okozta sérülés kockázata. Fertőzésveszély!

Figyelmeztetések

- A biológiai mintákat és a vérvételi tartozékokat (pl. lancettákat, tűket, Luer-adaptereket és vérvételi készleteket) a mindenkori hatályos higiéniai és biztonsági előírások figyelembevételével és betartásával kell kezelni.
- A HBC, a HCV, a HIV és egyéb fertőző betegségek a biológiai mintákkal való érintkezés révén átadhatók. Biológiai mintákkal való közvetlen érintkezés és az ebből eredő fertőzésveszély esetén azonnali orvosi ellátást javasolunk.
- A vérvételi tartozékok (pl. lancetták, tűk, Luer-adapterek és vérvételi készletek) ártalmatlanítására használjuk az ártalmatlanításra szolgáló gyűjtőládákat.
- A vérvétel és a vérvételi csővel folytatott munka során viseljük kesztyűt, hogy csökkentjük a vérrel való érintkezés kockázatát.

A VACUETTE® vérvételi készlet használatot megelőző tárolása

Javasolt tárolási hőmérséklet: 4–25°C (40–77° F).

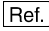




FIGYELEM! Ne tegyük ki a terméket közvetlen napsugárzás hatásának. A javasolt maximális tárolási hőmérséklet túllépése ronthat a VACUETTE® vérvételi készlet minőségén. **FIGYELEM!** A VACUETTE® vérvételi készlet DEHP plasztifikált polivinilkloridot tartalmaz.

A VACUETTE® vérvételi készlet használata

A VÉR VÉTEL ÉS A VÉR VÉTELI CSŐVEL FOLYTATOTT MUNKA SORÁN VISELJÜNK KESZTYŰT, HOGY CSÖKKENTHESSÜK A VÉRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS KOCKÁZATÁT!

1. Válasszuk ki a megfelelő csövet és a VACUETTE® vérvételi készletet.
2. Vegyük ki a csomagolásából a VACUETTE® vérvételi készletet. **FIGYELEM!** Már nyitott vagy sérült csomagolás esetén **dobjuk ki a VACUETTE® vérvételi készletet, és válasszunk helyette egy sértetlenet.**
3. Válasszuk ki a szúrás helyét. Szorítsuk el a vénát, és fertőtlenítsük a szúrás helyét. Megtisztítása után már ne tapogassuk a felületet (ne tapintsuk ki a vénát)! Tartsuk a VACUETTE® vérvételi készletet a szárnyaknál fogva, és óvatosan távolítsuk el a tűvédő kupakot.
4. Hajtsuk végre a vénás szúrást, oly módon, hogy a beteg karja lefelé mutasson.
5. A vérvételt követően óvatosan távolítsuk el a szárnyas kanült a vénából. Szorítsunk száraz és steril gézt a szúrás helyére, amíg csak a vérzés el nem áll. **FIGYELEM!** Ne fejtünk ki túlzott nyomást a szúrás helyére.
6. A használt VACUETTE® vérvételi készletet azonnal helyezzük az ártalmatlanításra szolgáló gyűjtőládába, a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.

A termékcímkék jelölései

	Cikkszám.
	Tételszám: Charge-szám.
	Lejáratási idő: A termék a megadott hónap végéig használható.
	A „sterilizálva etilénoxidral” jele
	Az „újra nem használható” jele

Referenciák:

<p>NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory and Approved Standards) H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition</p>

