

## VACUETTE® OTOMATİK HOLDER

### Kullanım:

Vacurette® kan alma iğnesini saat yönünde çevirerek, sıkıca Otomatik Holder'a yerleştirin (zorla iterek otomatik holdera yerleştirmeye çalışmayınız!).

Lütfen bu esnada iğnenin tam ortada ve düz olmasına dikkat edin. (bknz. resim 1) Aksi durumda iğne otomatik holdera tam olarak yerleşmediği için kan alımı yapılamaz. (bknz. resim 2)

Hareketli mavi renkli itme mekanizmasının ilk pozisyonda kalmasına dikkat edin (Bu pozisyonu korumak için başparmağınızla sabitleme yapabilirsiniz, (bknz. resim 1).

İğnenin kapağını çıkarın. Bundan sonraki aşamada kan alımı rutin kan alma prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilir.

Kan alımdan sonra iğne ile birlikte otomatik holder atık kovasının ağzına dik bir şekilde tutulur. (bknz. resim 3)

Otomatik Holderın mavi bölümdeki itme mekanizmasına basılarak iğnenin atık kutusuna düşmesi sağlanır. (bknz. resim 3)

Tekrar kullanılmayı sağlayan otomatik mekanizma sayesinde otomatik holder bir sonraki kan alımına hazırdır.

Otomatik Holder bir defadan fazla kullanıma elverişli bir holderdır\*.

### Temizleme:

Yapılan her kan alım işleminden sonra (her hasta) Otomatik Holder etkin ve kontrollü bir hazırlama işleminden geçirilmelidir (temizleme, dezenfeksiyon giriş/çıkış sterilizasyonu).

Otomatik Holderın hasar görmesi durumunda derhal atılmalıdır.



### Açıklama:

Otomatik Holderın ve VACUETTE® iğnelerinin / Luer Adaptörlerinin bağlantı yerleri birbirlerine uygundur.

Otomatik Holder sadece Greiner VACUETTE® iğneleri, Luer Adaptörleri ile kullanılmalıdır.

Otomatik Holder kullanımdan önce temizliği ve kullanılabilirliği bakımından kontrol edilmelidir.

\* Bazı ülkelerde otomatik holderın bir defadan fazla tekrardan hazırlanarak kullanılması yasaktır.

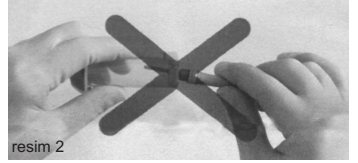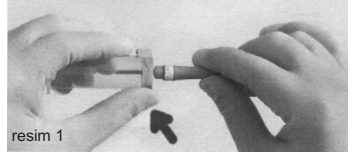

İğne

### İthalatçı Firma



Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No: 33 Torbalı - İZMİR  
Tel : (0 232) 853 94 66  
Fax : (0 232) 853 94 87  
e-mail : info@iztipsan.com www.iztipsan.com

### Üretici Firma

